

Behandlungsleuchte TGA OPTILUX® SL bedienen

Abb 0-1
Glasbedienfeld



- 1 Ein- / Ausschalter
- 2 Taster „Helligkeit/Farbtemperatur“ (Umschaltung)
- 3 Sensorfeld (zur Regelung der Helligkeit oder Farbtemperatur)
- 4 Taster „Programmwahl“ (Prog.1)
- 5 Taster „Reinigungsmodus“ EIN/AUS

Behandlungsleuchte ein- bzw. ausschalten



Taste Ein- / Ausschalter kurz drücken

- Behandlungsleuchte wird eingeschaltet

Taste Ein- / Ausschalter nochmals drücken

- Behandlungsleuchte wird ausgeschaltet

(Befindet sich die Lampe im Reinigungsmodus kann sie nur durch längeres Drücken ausgeschaltet werden)

Helligkeit einstellen



Taste Helligkeit/Farbtemp. drücken (Symbol Helligkeit leuchtet orange)

Zum Ändern der Helligkeit/Farbtemperatur den Finger über das Sensorfeld führen bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.




(Die gewünschte Helligkeitsstufe kann auch durch direktes antippen eines Sensorbalkens erreicht werden)

Farbtemperatur einstellen



Taste Helligkeit/Farbtemp. drücken (Symbol Farbtemp. leuchtet orange)

Zum Ändern der Helligkeit/Farbtemperatur den Finger über das Sensorfeld führen bis die gewünschte Farbtemperatur erreicht ist.

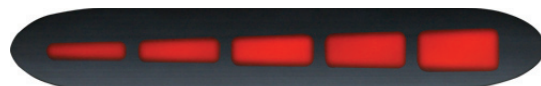

(Die gewünschte Helligkeitsstufe kann auch durch direktes antippen eines Sensorbalkens erreicht werden)

Programmplatz wählen



Programmtaste zum Umschalten zu einer gespeicherten Anwender-einstellung.

Umschalten P / P1

- Kurzes Drücken des Tasters wechselt zwischen P und P1 mit dem jeweils zuletzt manuell eingestellten Zustand.



Programmeinstellungen speichern



- Gewünschte Einstellungen vornehmen (Helligkeit/ Farbtemperatur)
- Drücken und Halten des Tasters **P** speichert die eingestellten Werte auf dem gewählten Programmplatz **P1** ab.

(Bestätigung durch akustisches Signal)



Reinigungsmodus einschalten



Der Reinigungsmodus dient zur Reinigung des Bedienfeldes und der Glasoberfläche. Im eingeschalteten Zustand ist das Bedienfeld deaktiviert, dadurch wird ein versehentliches Ändern von eingestellten Werten bei der Reinigung verhindert.



Taste „Reinigungsmodus“ kurz drücken

- Reinigungsmodus wird eingeschaltet (Symbolfarbe orange)

Taste „Reinigungsmodus“ lange drücken

- Behandlungsleuchte schaltet wieder in den Normallicht-Modus. (Symbolfarbe weiß)